

ETCHMASTER®

- Micro Abrasive Tip -

Allmänt

EtchMaster är en intraoral sandbläster med en-gångs ampuller som finns med olika innehåll av sandblästringsmedium, beroende vad för typ av åtgärd som skall vidtas. En-gångsampullerna finns i två storlekar: Large (upp till 24 tandytor) och Small (upp till 6 tandytor).

EtchMaster kan användas med en kontinuerligt svepande rörelse över ytan eller genom ett punktvis pulserande förfarande. Högre tryck ger mer avverkning. Bäst resultat erhålls med ett tryck runt 2,5-3,1 Bar. Håll munstycket på ca 1mm avstånd från tandytan. Ökas avståndet minskas abrasionseffekten samtidigt som den blästrade ytan blir större.

Användningsområden


För rengöring, uppruggning, polering av tandytor; emalj och dentin liksom olika tandersättningar, inför adhesiva åtgärder.

Säkerhetsaspekter

Läs bruksanvisningen noggrant före användning då tillverkaren inte ansvarar för hur enheten används.

- Släng ampullen efter användning då denna är avsedd för en-gångsbruk.
- Försök inte sterilisera, återfylla eller återanvända ampullerna.
- Upprepad användning försämrar ampullens effekt.
- Använd kofferdam för att skydda närliggande tänder och mjukvävnad. Matrisband ska användas för att skydda granntänders approximalytor.
- Med hänsyn till användningen av aluminiumoxidpulver är det nödvändigt att skydda ögon med skyddsglasögon på närvarande vid behandlingen. Som extra skydd kan personal även munskydd och använda ansiktssköld.
- Använd inte syre, brännbar eller toxisk gas som drivmedel till blästern.
- Överdriven abrasion leder till onödig erosion av ytan. Prova på olika material som mynt, extraherade tänder, glasytor innan enheten används. Dessa ytor simulerar både ädla och oädra metallytor liksom porslin.

OBS: Rikta inte EtchMasters munstycke mot ditt ansikte eller mot ögonen. Använd alltid skyddsglasögon när denna enhet används. Återfyll eller återanvänd inte ampullerna när dessa är tomma. Släng på lämpligt sätt.

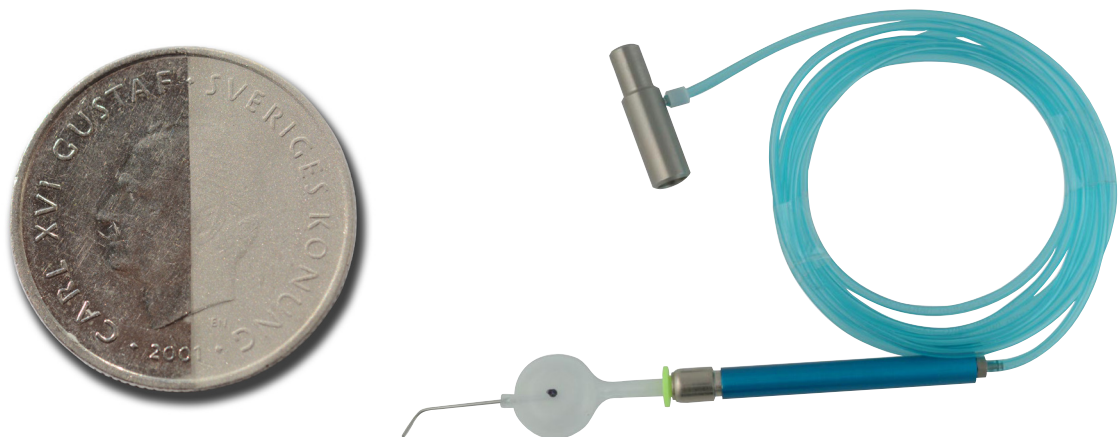

Färgkod

Blästermedium

Indikationsområden

● Svart	Hård abrasiv - 50µ Aluminiumoxid	Bonding, fissurförsegling, restaurativ åtgärder
● Röd	Hård abrasiv - 27µ Aluminiumoxid	Bonding, fissurförsegling, restaurativ åtgärder
● Lila	Hård abrasiv - Glaspärlor	Porslinsreparatur, bonding
● Blå	Mild abrasiv 25% Alox+75% Bikarbonat	Fissurförsegling och ingrodda ytmissfärgningar
● Grön	Mjuk abrasiv - Natriumbikarbonat	Borttagning lätta missfärgningar
● Gul	Mjuk abrasiv - kalciumkarbonat	Ytliga missfärgningar, rengöring fissurer


BRUKSANVISNING

Viktigt: Läs igenom bruksanvisningen för användning.

Koppla in Etchmaster® enheten på uniten med hjälp av multiflexadaptern.


STEG 1 - Välj typ av medium. Se färgpunkt på ampullen.

Röd & Svart - Hård Blå - Mild Grön - Mjuk

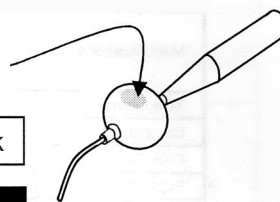

STEG 2 - Håll röränden på en EtchMaster-ampull med ena handen och håll "pennan" i den andra handen. För in röret i öppningen med ett bestämt tryck.

VIKTIGT - Efter att patronen förts in drag i den, för att kontrollera att den sitter väl isatt.

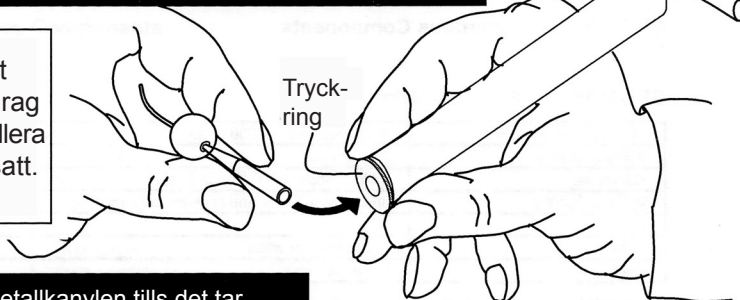


STEG 3 - Drag ut metallkanylen tills det tar emot.

Etchmaster® är nu redo att användas.

STEG 4 - Rikta kanylen mot avsedd yta och blåstra genom att aktivera enheten.

Etchmaster®-ampullen slängs när den tömts.

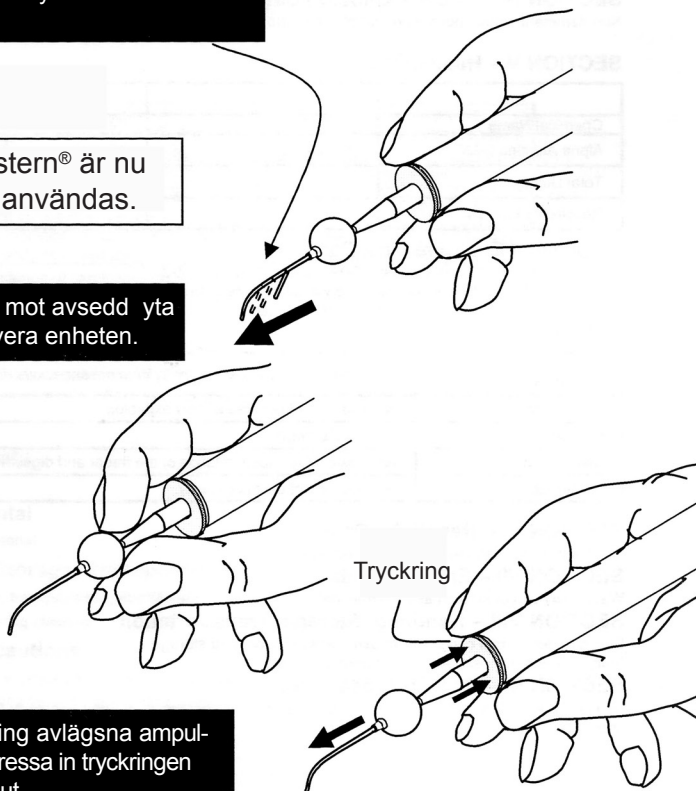

STEG 5 - Efter användning avlägsna ampullen från enheten genom att pressa in tryckringen samtidigt som patronen dras ut.

Färgkod Blästermedium

- Svart Hård abrasiv - 50µ Aluminiumoxid
- Röd Hård abrasiv - 27µ Aluminiumoxid
- Lila Hård abrasiv - Glaspärlor
- Blå Mild abrasiv 25% Alox+75% Bikarbonat
- Grön Mjuk abrasiv - Natriumbikarbonat
- Gul Mjuk abrasiv - kalciumkarbonat

Indikationsområden

- Bonding, fissurförsegling, restaurativ åtgärder
- Bonding, fissurförsegling, restaurativ åtgärder
- Porslinsreparatur, bonding
- Fissurförsegling och ingrodda ytmissfärgningar
- Borttagning lätta missfärgningar
- Ytliga missfärgningar, rengöring fissurer