

NB Instrument kit**Handinstrument för kompositmodellering**

Kontrollera förekomst av eventuella skador på instrumenten innan de används. Använd inte om skador förekommer.

Rengör instrumenten snarast efter användning: Instrumenten kan tvättas för hand eller i ultraljudsbad eller i automatisk diskmaskin, med användning av icke korrosivt, låglöddrande och neutralt rengöringsmedel. Använd inte skurmedel.

Sterilisera före användning första gången och mellan patienter: Autoklavera i 20 minuter vid 121°C/250°F (15 psi)

BISCO INC.
1100 W. Irving Park Rd
Schaumburg, IL 60193
847-534-6000
1-800-BIS-DENT
www.bisco.com

HULTÉN & Co AB
Limhamnsgårdens Allé 17
S-21616 Malmö
040 – 15 66 77
mail@hulten.com
www.hulten.com

CE ADMINISTRATOR
Mr. Fred Picavet
120 Allé de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
Phone: 33-490-42-9292